

# Описание предварительно заполненных одноразовых шприц-ручек и инструкция по их использованию

Пралуэнт, 75 мг, раствор для подкожного введения в предварительно заполненной шприц-ручке.

Пралуэнт, 150 мг, раствор для подкожного введения в предварительно заполненной шприц-ручке.

Инструкция по применению

Пациента необходимо информировать о том, что он должен сохранять эту инструкцию, т.к. она может понадобиться ему снова. Если у пациента появятся вопросы, то ему следует обратиться к лечащему врачу или провизору или позвонить по номеру телефона Представительства АО «Санофи-авентис групп», указанному в инструкции.

Части шприц-ручки указаны на рисунке



## Важная информация

- шприц-ручка предназначена только для одноразового использования;
- шприц-ручка с зеленой кнопкой: в 1 мл раствора содержится 75 мг алирокумаба;
- шприц-ручка с серой кнопкой: в 1 мл раствора содержится 150 мг алирокумаба;
- препарат вводится подкожно либо самим пациентом, либо другим лицом, ухаживающим за ним;
- шприц-ручку можно использовать только для одноразовой инъекции, и она должна быть утилизирована после применения.

## Правила использования

- шприц-ручку следует хранить в недоступном для детей месте;
- перед использованием шприц-ручки следует внимательно прочитать инструкцию;

- необходимо следовать всем указаниям, представленным в инструкции, при каждом использовании шприц-ручки;

- неиспользованные шприц-ручки следует хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С.

### **Запрещено**

- трогать желтый защитный колпачок;

- использовать шприц-ручку при протекании или повреждении;

- использовать шприц-ручку при отсутствии голубого колпачка или если он ненадежно закреплен;

- использовать шприц-ручку повторно;

- трясти шприц-ручку;

- замораживать шприц-ручку;

- подвергать шприц-ручку воздействию прямых солнечных лучей.

### **Этап А. Подготовка к введению**

Перед введением препарата пациенту понадобятся:

- шприц-ручка с препаратом Пралуэнт;

- салфетки, смоченные спиртом;

- ватные тампоны или марля;

- контейнер, резистентный к проколам.

#### **1. Проверить этикетку на шприц-ручке:**

- убедиться, что взят правильный (нужный пациенту) препарат и правильная (нужная пациенту) доза (шприц-ручка с зеленой кнопкой — для дозы 75 мг/мл и шприц-ручка с серой кнопкой — для дозы 150 мг/мл);




- проверить срок годности. Не использовать по истечении срока годности.

#### **2. Проверить окно:**

- проверить, чтобы видимая в окно жидкость была прозрачной и бледно-желтой, без включений.

Если имеются изменения цвета и видимые включения, то не следует использовать шприц-ручку (см. рисунок А);

- пациент может увидеть пузырьки воздуха. Это нормальное явление, не влияет на дальнейшее использование препарата;
- не использовать шприц-ручку, если окно желтого цвета и не содержит жидкости (см. рисунок В).

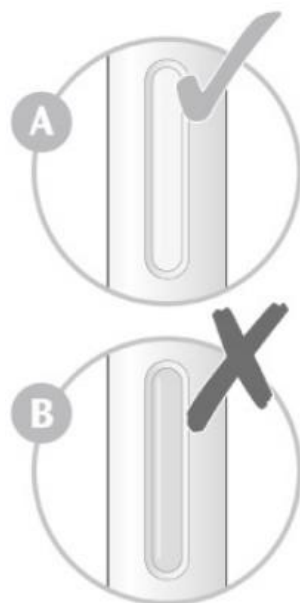


### 3. Оставить шприц-ручку согреваться при комнатной температуре в течение 30–40 мин:

- не нагревать шприц-ручку, она должна согреться сама;
- использовать шприц-ручку как можно скорее после того, как она нагрелась;
- не класть шприц-ручку обратно в холодильник.

### 4. Подготовка места введения препарата:

- вымыть руки водой с мылом и вытереть их полотенцем;
- можно вводить препарат в область бедра, живота (за исключением области 5 см вокруг пупка), наружную поверхность плеча (см. рисунок);

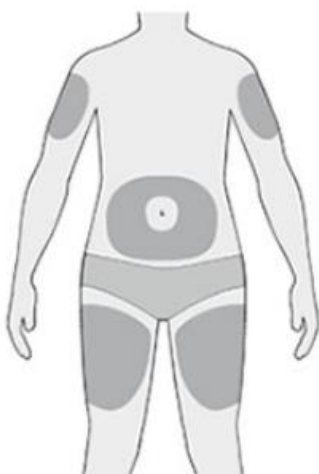


- пациент может стоять или сидеть во время введения препарата;
- продезинфицировать место введения салфеткой, смоченной спиртом;
- не вводить препарат в болезненную, уплотненную, покрасневшую или воспаленную кожу;

- не вводить препарат в места рядом с видимыми венами;
- использовать разные места при каждом введении препарата.
- не вводить препарат в одно и то же место с другими препаратами.

### Этап В. Как вводить препарат

#### 1. После завершения всех пунктов «Этап А. Подготовка к введению» снять голубой колпачок:

- не снимать колпачок до тех пор, пока пациент не будет готов к введению препарата;
- не надевать голубой колпачок обратно.

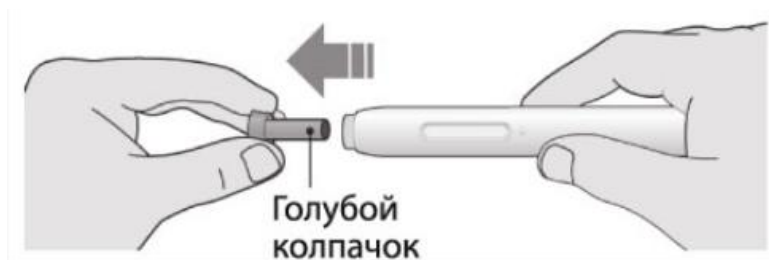


#### 2. Держать шприц-ручку, как показано на рисунке:

- не трогать желтый защитный колпачок;
- убедиться, что видно окно.



#### 3. Прижать желтый защитный колпачок к коже примерно под углом 90°:

- прижимать шприц-ручку к коже и удерживать ее так, чтобы желтый защитный колпачок стал невидимым (вдавленным в кожу). Шприц-ручка не будет работать, если желтый защитный колпачок не вдавлен в кожу полностью;

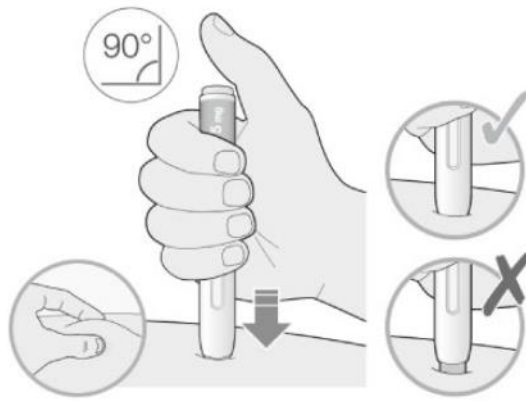

- при необходимости следует зажать кожу, чтобы убедиться, что место введения плотное.

**4. Нажать большим пальцем на зеленую (если используется шприц-ручка Пралуэнт, 75 мг) или серую кнопку (если используется шприц-ручка Пралуэнт, 150 мг) и сразу отпустить ее:**

- будет слышен щелчок. Введение препарата началось;
- окно начнет желтеть.



**5. Продолжать удерживать шприц-ручку плотно прижатой к коже после того, как отпущена кнопка:**

- введение препарата может продолжаться до 20 с.



**6. Проверить, что окно стало желтого цвета до того, как убрана шприц-ручка с кожи:**

- не убирать шприц-ручку с кожи до тех пор, пока все окно не будет желтого цвета;
- введение препарата завершено, после того как все окно будет желтого цвета и будет слышен второй щелчок;

- если окно не стало полностью желтого цвета, не следует вводить самостоятельно вторую дозу без консультации врача.



### 7. Убрать шприц-ручку с кожи:

- не растирать кожу после введения препарата;

- если пациент видит кровь, необходимо прижать ватный тампон или марлю и удерживать их до тех пор, пока не остановится кровотечение.



### 8. Утилизировать шприц-ручку и колпачок:

- не надевать голубой колпачок повторно;

- поместить шприц-ручку в контейнер, резистентный к проколам;



- всегда хранить контейнер в недоступном для детей месте.